

DIABASS[®] PRO

Un software per tutti gli strumenti di misura

✓ Semplice

DIABASS[®] PRO si apprende in modo rapido ed è semplice da usare. Con pochi clic del mouse e un tempo davvero esiguo, è possibile rilevare un paziente, leggere lo strumento di misura e stampare i dati.

✓ Completo

DIABASS[®] PRO copre tutti i requisiti della moderna documentazione sul diabete. Che si tratti di andamento della glicemia, analisi AGP strutturata, analisi giornaliera standard o valutazione con pompa per insulina - *DIABASS[®] PRO* offre un'ampia gamma di potenti funzioni di valutazione.

✓ Aperto

Con *DIABASS[®] PRO* è possibile leggere e valutare tutti i comuni strumenti di misura della glicemia di tutti i produttori, CGM e FreeStyle Libre, pompe per insulina e strumenti di misura della pressione sanguigna.

Anche in considerazione del gran numero di applicazioni per il diabete *DIABASS[®] PRO* è la soluzione ideale: da numerose applicazioni è possibile realizzare una comoda acquisizione dati.

✓ Compatibile con la rete

Ovviamente *DIABASS[®] PRO* è compatibile con la rete. Senza costi aggiuntivi riceverete un'interfaccia BDT/GDT integrata per il collegamento a tutti i comuni sistemi EDP dello studio medico. Disponibile come opzione: collegamento HL7 per sistemi informativi ospedalieri.

✓ Obbligo di riservatezza e privacy

A differenza delle soluzioni basate su Internet, con *DIABASS[®] PRO* tutti i dati dei pazienti rimangono esclusivamente archiviati dal medico. Per l'utilizzo di *DIABASS[®] PRO* non sono necessarie dichiarazioni dedicate sulla protezione dei dati, il rilascio di dichiarazioni di consenso dei pazienti e la nomina di un responsabile della protezione dei dati

✓ Telemedicina

Sia che si tratti di colmare le distanze più lunghe tra paziente e diabetologo, sia che si tratti di un monitoraggio ravvicinato per una gravidanza o aborto: l'uso della telemedicina può essere molto utile anche nel campo del diabete. *DIABASS[®] PRO* incorpora funzioni di programma che consentono una trasmissione agevole, sicura e semplice dei dati dal paziente al medico.

DIABASS[®] PRO
Un software per tutti gli strumenti di misura



**Gestione dati
sul diabete**
per studi medici e cliniche



2

Un software per tutto
Senza compromessi sulla privacy

Conforme alla protezione e senza false promesse: **DIABASS® PRO**, il software aperto per tutti i dispositivi! È necessario un unico software per leggere tutti i comuni strumenti di misura della glicemia, nonché CGM e sistemi di pompaggio dell'insulina. Anche i dati inviati dai pazienti dalle app possono essere facilmente acquisiti.

Con **DIABASS® PRO** il trasferimento dati non è possibile solo da sistemi leader sul mercato come Accu-Chek, Contour o FreeStyle Libre, bensì sono in grado di leggerli anche gli strumenti di misura di fornitori "minori" quali Beurer, Aktivmed o Wellion.

DIABASS® PRO è anche la soluzione ottimale per quanto riguarda il RGPD e l'obbligo di riservatezza da parte del medico, perché tutti i dati vengono archiviati esclusivamente a livello locale. Una specifica informazione o il consenso dei pazienti non è quindi necessario. Naturalmente il vostro comportamento di utilizzo e prescrizione in qualità di utente non viene registrato e monitorato.

Acquisizione dati da numerose app e programmi esterni - ad esempio da mySugr, Sidiary, Contour Diabetes App, Accu-Chek connect, Clarity, Carelink, ...



Ricezione automatica dei dati dalle app



La telemedicina è molto semplice: il paziente invia via e-mail i dati dalla sua app per il diabete. **DIABASS® PRO** raccoglie automaticamente queste e-mail e le importa direttamente senza lunghe fasi intermedie.

Trasferimento dati da tutti i comuni strumenti di misura della glicemia, da FGM/CGM e dalle pompe per l'insulina, dagli strumenti di misura della pressione sanguigna e da altri dispositivi (ad esempio, contapassi).

Riconoscimento automatico del dispositivo

Il trasferimento dati è ancor più semplice: numerosi strumenti di misura vengono riconosciuti e letti automaticamente se collegati al PC.







**Innovativo. Semplice.
Salvatempo.**

La gestione dei dati sul diabete non deve essere complicata. L'interfaccia del programma di **DIABASS® PRO** è facile da usare e in gran parte autoesplicativa. Grazie alla guida utente ergonomica, i tempi di formazione sono ridotti al minimo.

Tutte le funzioni di valutazione sono disposte in tabelle e possono essere richiamate direttamente. **DIABASS® PRO** è estremamente flessibile: se lo desiderate, potete adattare il display alle vostre esigenze individuali.

- ✓ **Facilità di utilizzo:** l'interfaccia utente è stata completamente rielaborata e presenta un design chiaro
- ✓ **Ergonomica:** rinunciando all'uso dei pulsanti si evitano inutili clic del mouse
- ✓ **Comoda selezione del tempo:** selezionare il periodo di visualizzazione comodamente tramite una linea temporale
- ✓ **Personalizzabile:** la finestra delle proprietà permette un rapido adattamento dei grafici con un semplice clic del mouse

- 1 – Il periodo di valutazione desiderato può essere comodamente limitato utilizzando la **comoda barra di selezione**
- 2 – Passare da una valutazione all'altra tramite **Linguette**
- 3 – Il simbolo  può essere utilizzato per aprire una nuova scheda
- 4 – Usare il simbolo  per aprire una finestra delle proprietà per personalizzare la visualizzazione
- 5 – Le **statistiche** sono anche disposte in linguette chiaramente disposte
- 6 – Sempre in vista: il **valore medio della glicemia** e il **valore HbA1c** calcolato degli ultimi 90 giorni



Moduli utili Report dettagliati

Affidabile **Supporto terapeutico**

Collegamento al sistema dello studio medico

Autoesplicativo Guida utente ergonomica Universale

Compatibile **Diabete** **Trasparente** **AGP**

Giorno standard aperto a tutti gli strumenti di misura Compatibile in rete

Supporto App **Telemedicina** **supporta oltre 300 dispositivi**

Obbligo di riservatezza del medico

time-in-range

Più tempo per pazienti

DIABASS[®] PRO

Conforme alla protezione dei dati

Riconoscimento automatico del dispositivo

Un software per tutti gli strumenti di misura

indipendente dal produttore

Comprovato **Completo**

Acquisizione dati

Facile da usare Personalizzabile Comoda selezione del tempo

Gestione dei dati **Valutazioni**

CGM Analisi AGP strutturata


6

In sintesi


Tutti i requisiti della documentazione contemporanea sul diabete. Che si tratti di andamento della glicemia, analisi AGP strutturata, analisi giornaliera standard o valutazione con pompa per insulina - **DIABASS® PRO** offre un'ampia gamma di potenti funzioni di valutazione.



Andamento del glucosio
 Andamento della glicemia con insulina, tasso basale, nutrizione, sport, ...

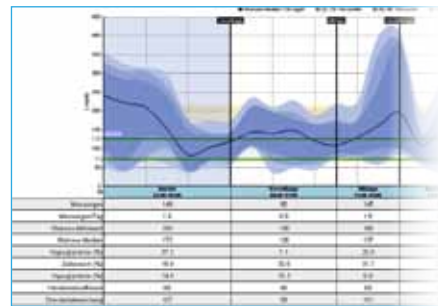

AGP (Ambulatory Glucose Profile)
 Rappresentazione strutturata del profilo glicemico completo

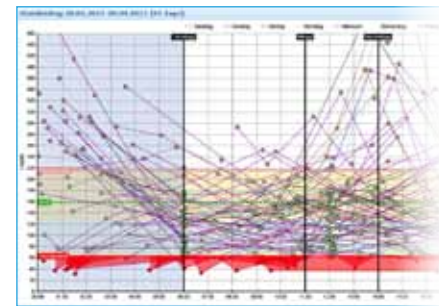

Numerose funzioni nel tag standard
 Numerose opzioni aggiuntive, tra cui visualizzazione degli intervalli di tempo



Analisi AGP
 Analisi del profilo glicemico con diversi criteri



Impostazioni della pompa
 Gestione dei profili del tasso basale e delle impostazioni delle varie pompe per insulina



Confronto dei periodi
 In sintesi; settimane, trimestri, 14 giorni, giorni feriali, intervalli di tempo



Analisi dell'orario
 In sintesi; al mattino, a mezzogiorno, al pomeriggio, alla sera e di notte



Diario
 Rappresentazione come diario della glicemia

E molto altro ancora...