

4

Premiers pas avec DIABASS® PRO

DIABASS® PRO est un produit de mediaspects GmbH
Postfach 10 07 31, D-72307 Balingen



DIABASS® PRO

Un seul logiciel pour tous les lecteurs



Démarrez DIABASS® PRO en cliquant sur l'icône du logiciel sur le bureau



Au démarrage, la **liste des patients** s'affiche automatiquement ; vous pouvez à tout moment consulter cette liste ultérieurement via le bouton « GESTION » **A**.

Ouvrez la fiche d'un **patient existant** en double-cliquant dans la liste des patients ou créez un nouveau patient en cliquant sur le bouton correspondant.

La zone d'analyse s'ouvre alors, affichant les 90 derniers jours avec les valeurs enregistrées. Vous pouvez consulter à tout moment cette zone en cliquant sur le bouton « ANALYSE » **C**.



i Pour importer les données d'un instrument de mesure, cliquez sur le bouton IMPORTATION **B**, sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste en double-cliquant dessus et suivez les instructions de transfert des données. De nombreux appareils sont automatiquement détectés lorsqu'ils sont connectés à l'ordinateur.



- 1 – La **barre de sélection très pratique** permet de limiter facilement les données à une période souhaitée
- 2 – Basculez facilement entre les différentes analyses à l'aide des **onglets**
- 3 – Le symbole permet d'ouvrir un nouvel onglet
- 4 – Le symbole vous permet d'ouvrir une fenêtre de propriétés pour adapter la présentation selon vos besoins
- 5 – Les **statistiques** se présentent aussi sous forme d'onglet
- 6 – Toujours visibles : le **taux moyen de glycémie** ainsi que le taux calculé de **HbA1c** des 90 derniers jours

GUIDE RAPIDE

Premiers pas

Télécharger maintenant
**VERSION D'ESSAI
GRATUITE**
www.diabass2018.com

A 118-03122018-FR ; Crédit photo : © ktsdesign - Fotolia.com

1



Première installation sur ordinateur

L'installation de *DIABASS® PRO* est très simple et rapide. Aucune connaissance informatique particulière n'est requise.

Double-cliquez sur le fichier exécutable diabass6.exe que vous venez de télécharger ou qui se trouve sur le CD.

Après l'installation automatique de *DIABASS® PRO*, une icône est créée sur le bureau et le logiciel démarre.



Vous serez ensuite invité(e) à activer le logiciel à l'aide d'un fichier de licence valide.

Sélectionnez alors le fichier de licence (dont l'extension est *.key) que vous avez obtenu avec le logiciel ou en le téléchargeant et confirmez en cliquant sur OK.



Si vous utilisez *DIABASS® PRO* sur un seul poste de travail (c-à-d. sans accès au réseau), l'installation est alors terminée.

Vous pouvez alors passer à l'**étape 3** (Transmission des données *DIABASS®5*) ou à l'**étape 4** (Premiers pas).

2



Installation sur le réseau

Si vous souhaitez utiliser *DIABASS® PRO* sur le réseau, vous devez alors installer un répertoire de bases de données exploitable pour tous les postes de travail. L'installation est automatique.



Dans *DIABASS® PRO*, cliquez sur le bouton **PARAMÈTRES**



Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'onglet « Système/base de données » et cliquez alors sur **MODIFIER LES PARAMÈTRES**



La fenêtre des paramètres système s'ouvre alors. Sélectionnez le bouton « **Créer une nouvelle base de données pour l'accès au réseau** »

Dans votre réseau local, sélectionnez un répertoire de travail afin d'y stocker les données patients.



IMPORTANT : sélectionnez un répertoire vide accessible de la même manière sur tous les postes de travail ou attribuez au répertoire, si possible, la même lettre de lecteur (par ex. y:\daten\diabass)

Après quelques secondes, la structure du répertoire nécessaire est créée. Pour toute installation supplémentaire sur le réseau, un fichier d'installation pré-configuré a été créé.

3



Récupération des données de *DIABASS® PRO*


Pour récupérer les données patients depuis une version existante de *DIABASS® PRO*, basculez dans la fenêtre des paramètres système (voir l'étape 2). Cliquez alors sur le bouton « **Assistant de récupération de la base de données *DIABASS® PRO*** ». Choisissez alors un répertoire avec une base de données existante et démarrez la récupération des données en cliquant sur « OK ».

Après un bref moment, les données sont alors converties dans le nouveau format de *DIABASS® PRO*.



IMPORTANT : les données existantes ne seront pas compromises lors de la conversion. Vous pouvez donc récupérer les données sans danger pour vous exercer et continuer à travailler sur l'ancienne version du logiciel jusqu'à la migration finale.

Une récupération de la base de données actuelle doit également être faite avant la migration finale.

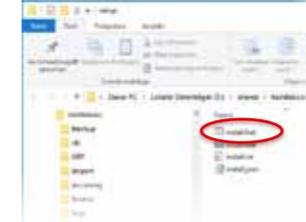

Pour installer le logiciel sur d'autres postes de travail sur le réseau, procédez comme suit :

Dans le répertoire *DIABASS® PRO* nouvellement créé, basculez sur le lecteur du serveur et ouvrez le sous-dossier « setup » (configuration), par exemple y:\daten\diabass\setup
Cliquez alors sur le fichier install.bat : la solution *DIABASS® PRO* s'installe alors en quelques secondes sur le poste de travail. Répétez ensuite cette étape sur les autres postes de travail sur lesquels *DIABASS® PRO* doit être utilisé.